

## Faktablad om fastspænding af kørestole/minicrosser i biler

### Kørestol eller fast sæde?

Når en kørestolsbruger skal ud at køre, skal man som udgangspunkt sidde i kørestolen under kørslen. Såfremt kørestolen ikke kan fastspændes forsvarligt, skal kunden ved let støtte fra chaufføren kunne forflyttes fra kørestol til fast sæde.

Kunder som sidder i trehjulet minicrosser, skal altid sidde på et fast sæde under kørslen.

### Forankringspunkt

På samme måde som en bils sæder er fastspændt i bilens bund, skal kørestolen/minicrosser også spændes fast til vognbunden. Bilen som bruges til at transportere en eller flere kørestolsbrugere, er derfor forsynet med forankringspunkter til at fastholde kørestolen. Forankringspunkter er skinner eller faste punkter (kopper) i bunden af bilen.



Der findes forskellige typer af forankringspunkter, her skinner (venstre) og kopper (højre).


(Billederne er venligst udlånt af Handi-Safety)

### Firepunktsfastspænding

En firepunktsfastspænding er en anordning, der er beregnet til at spænde kørestolen/minicrosseren fast i bilens bund. For at hjælpemidlet kan være solidt fastgjort i forankringspunkterne, skal fastgøringen ske fire steder – to foran og to bagpå.

Firepunktsfastspændingerne indstilles, så vinklerne i forhold til gulvet bliver som angivet på instruktionsstegningerne:

Eksempel på fastspænding:

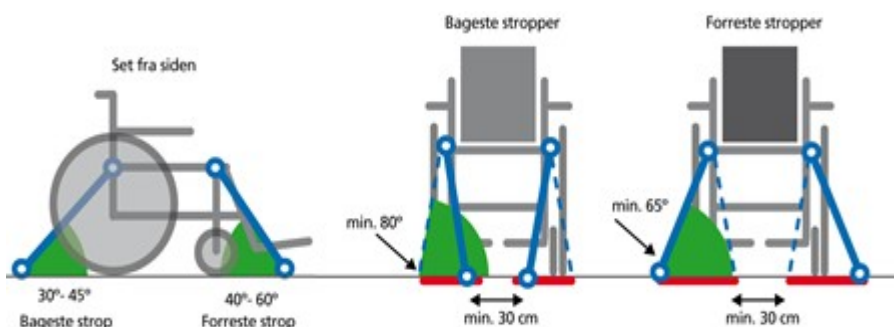

Vinklerne på fastgøringen af stropperne sikrer kørestolen og kørestolsbrugeren optimalt under forskellige uheldsscenarier.

Forankringsområde 